

・・・新発想の進化した採尿具・・・

ハルンキット[®]S

I 準備

- ① バーコードラベルの貼付は外筒のストレート部が長く貼り易い。
- ② ハルンキットは軽量・コンパクトで、安価に郵送ができます。

郵送 安価

外径 約 19.5mm
重量 約 9g

II 採尿

- ① 広い採尿口で採尿が容易です。
- ② ネジ式で確実に閉められます。尿もれの不安がありません。
- ③ 自宅採尿の際、ゴミが発生しません。
- ④ チャック袋の併用で万一の尿もれにも安心です。

採尿：簡単・清潔

尿もれ：ネジ設計で安心

III 検査

- ① 採尿量は 6 ml 採取できます。
- ② 口内径は約 13 mm です。スピッツ内の液高も約 72 mm 確保でき、10 項目の尿試験紙の検査も容易です。
- ③ 尿自動分析装置等機械検査が可能。
- ④ 遠心分離⇒尿沈渣・鏡検ができます。
(尿自動分析装置での検査後、約 5 ml の検体が残る為⇒遠心分離後 0.1 ml の沈渣で鏡検できます。)

《注意》JCCLSの指針では沈渣・鏡検は 10ml の検体を原則としていますので、実施するか否かは必ず施設でご判断頂く必要があります。

自動検査：機械に適合

- 尿自動分析装置
- 尿中成分分析装置



ハルンキットS(黄色半透明・PP製)

部品名	概寸 最大径×長さ(mm)
栓	19.5×28
採尿容器	14.5×104
外筒	19.5×106.5

※外筒が透明の製品もご用意しております。

使用上の注意

・採尿用途以外には使用しないでください。

採尿器の廃棄処理

・市町村の廃棄処理区分に従ってください。

・仕様は予告なく変更する場合があります。

製造発売元 旭電機化成株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目3番18号

TEL : (06)6976-1371 FAX : (06)6976-8940

E-mail : harnkit@smile-asahi.co.jp

特許申請中

®登録商標