コップ不要の自宅採尿用キット

ノルンキット ミニ



Ⅰ.確実な採尿性

○1つの主採尿口と背面に3つの補助採尿口を有し、確実な採尿ができ、検査の尿量不足が解消 ○袋に採尿の動画(QRコード)を表示

Ⅱ. コップ不要

○ 採尿時コップ不要

Ⅲ. 尿スクリーニング検査

○目視法、セミオートおよび全自動尿分析装置(ラックにシスメックス保持具 NO.59装着)に対応

- 1~5項目の尿試験紙および、スティック長さ82mmの尿試験紙にも対応
- •栓は横倒しで開栓し、開口部から尿試験紙を挿入
- ●開栓せず採尿容器を引き上げ止め、主採尿口から尿試験紙の挿入も可能

Ⅳ. 軽量・小型化

- ○プラスチックごみの廃棄量減量
- ◆製品本体のみ 5.5g ◆採尿量 2.5 ml

V.トイレ混雑緩和

○ 自宅採尿により受診機関でのトイレの混雑を緩和



使用上の注意

採尿器の廃棄処理

・採尿用途以外には使用しないでください。 ・市町村の廃棄処理区分に従ってください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

製造発売元 旭電機化成株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路 4 丁目 3 番 18 号 TEL: (06)6976-1371 FAX: (06)6976-8940

E-mail: harnkit@smile-asahi.co.jp

意匠出願済 特許出願済 (R)登録商標

15.5						1 2.5
	← 22 →		- 11	96 ——— 8 ———	→	[mm
部品	品名	栓		採尿容器	外	筒

• • •	•	7 · [IIIII]		
部品名	栓	採尿容器	外筒	
材質	PP	PP	PE	
色	透明緑	透明	黄色	



採尿の仕方



採尿方法の動画

外筒


外筒を抜き取り、栓に しつかりさし込む。

2採尿




排尿しているところに、 採尿口をあて容器一杯に 入れる。

3密封

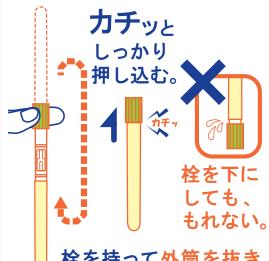

栓を持って外筒を抜き 取り、元に戻ししっかり 止まるまで押し込む。

4提出

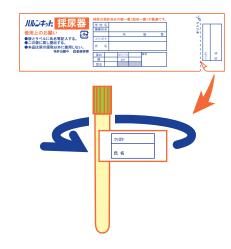

袋のラベルを切り取り、うらのテープをはがし、巻きつけ袋に入れ提出する。